

VS
VSCULPT. | *A Healthier You, Inside and Out™*



BEDIENUNGSANLEITUNG

MODELLE: VS1100
VS1150



EC

REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Australian Sponsor
EMERGO AUSTRALIA
Level 20, Tower 8
Darling Park, 201 Sussex Street Sydney
NSW 2000 Australia



Health
Canada

Santé
Canada

Registrieren Sie Ihr Produkt
unter www.vsculpt.com

Besuchen Sie vsculpt.com, um mehr über vSculpt-Behandlungen,
-Zubehör, Beckenbodengesundheit und Vorsorgemaßnahmen zu erfahren.

INHALTSVERZEICHNIS

97 WILLKOMMEN BEI vSCULPT

- Ihr Gerät registrieren

98 VORSICHTSMASSNAHMEN

100 MACHEN SIE SICH MIT vSCULPT VERTRAUT

101 ZUBEHÖR

- vSculpt Photonic Gel™

102 LERNEN SIE vSCULPT KENNEN

- Was Sie erwarten können
- Beste Ergebnisse erzielen

103 FUNKTIONEN

- Betriebsarten & Einstellungen

104 VORBEREITUNG ZUM GEBRAUCH

- Beratung von Ihrem Arzt
- Aufladen

105 ERSTE SCHRITTE

- Anwendung von vSculpt

107 BEHANDLUNGSPÄNE

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
- Therapieplan
- Instandhaltungsplan

108 WICHTIGE INFORMATIONEN

- Pflege, Reinigung und Aufbewahrung

109 SUPPORT

- Garantie
- Anleitung zur Fehlerbehebung
- Kontaktinformationen
- Entsorgungsrichtlinien für Elektro- und Elektronik-Altgeräte
- RoHS-konform
- Technische Spezifikationen
- Begriffserläuterung der Symbole



WILLKOMMEN BEI vSCULPT

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf!

vSculpt ist ein medizinisches Handgerät, das zur Festigung, Straffung und Wiederherstellung schwacher Beckenbodenmuskeln und vaginalen Geweben zur Behandlung von Stress, gemischter und milder bis moderater Dranginkontinenz bei Frauen dient. Es ist auch zur Verbesserung der sexuellen Erfüllung bei Frauen angezeigt, die aufgrund von Scheidentrockenheit und Erschlaffung des Vaginalgewebes unter einer sexuellen Funktionsstörung leiden. Zur Behandlung von Beckenmuskelschmerzen und für bessere Heilung und stärkere Durchblutung.

vSculpt bietet zwei Modelle an, vSculpt und vSculpt PRO. Sculpt PRO wird ausschließlich über unsere professionellen Partner verkauft. In dieser Bedienungsanleitung werden beide Modelle vorgestellt.

Um die heilenden Eigenschaften von vSculpt zu beschleunigen, empfehlen wir die Verwendung mit unserem Photonic Gel™ (wird separat verkauft).

Es ist wichtig, dass Sie die Anweisungen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweise in dieser Broschüre lesen und verstehen, bevor Sie Ihr vSculpt zum ersten Mal benutzen.

***Bitte laden Sie Ihr vSculpt 12 Stunden vor dem ersten Gebrauch auf, um ordnungsgemäßen Betrieb und ordnungsgemäße Akkulaufzeit zu gewährleisten.**

Ihr vSculpt registrieren

Registrieren Sie Ihr vSculpt heute auf www.vSculpt.com, um Ihre einjährige Garantie und Zugang zu exklusiven Informationen über vSculpt, Zubehör und Produktneuheiten zu erhalten.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie vor der Verwendung die folgenden Absicherungsmaßnahmen durch. Verwenden Sie vSculpt vorsichtig und mit gutem Einschätzungsvermögen.



Dieses Warnsymbol erscheint neben Informationen über mögliche Sicherheitsrisiken. Lesen und befolgen Sie alle Warnungen und Sicherheitshinweise.

- Verwenden Sie dieses Produkt nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen vorgesehenen Zweck.
- Dieses Gerät darf von Personen unter 18 Jahren nicht verwendet werden und Kinder unter 18 Jahren, die sich in der Nähe des Gerätes befinden, müssen von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

⚠ Dieses Gerät ist nicht wasserdicht und darf nicht in Wasser getaucht werden. Es kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

⚠ Schließen Sie vSculpt nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel und nur an USB-Netzteile an, die den nationalen Normen IEC 60950-1 oder IEC 60601-1 entsprechen.

⚠ Änderungen an diesem Gerät sind nicht zugelassen.

⚠ Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.


⚠ Laden Sie das Gerät während seiner Verwendung nicht auf.

⚠ Mobile HF-Kommunikationsgeräte können medizinische elektrische Geräte beeinflussen.

- vSculpt ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Nutzen Sie es nicht gemeinsam.
- Das Gerät muss nach jeder Verwendung gründlich gereinigt werden.
- Das Gerät darf bei einer aktiven, sexuell übertragbaren Krankheit nicht verwendet werden, da bei einer aktiven Infektion Symptome auftreten können, die durch die Verwendung des Gerätes verschlimmert werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie krebsbekämpfende Medikamente, Arzneimittel oder topische Cremes verwenden, die die Lichtempfindlichkeit erhöhen. Sie können eine Nebenwirkung verursachen.
- Dieses Gerät darf nur vaginal eingeführt werden.
- **Verwenden Sie mit diesem Gerät keine Gleitmittel auf Silikonbasis.**
- Blicken Sie nicht direkt in die LED-Leuchtmittel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind oder denken, dass Sie schwanger sein könnten.
- Lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten, wenn Sie Unterleibsschmerzen oder andere medizinische Probleme oder gesundheitliche Bedenken haben, bevor Sie dieses Gerät benutzen.

- Wenn Sie Taubheitsgefühl, Hautreizung, Schwindel oder Schmerzen spüren, sollten Sie sofort von einer weiteren Verwendung des Gerätes absehen und Ihren Arzt aufsuchen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät in der Nähe von Körperpiercings verwenden.
- Sollte es im Behandlungsbereich zu einer anhaltenden Rötung und Empfindlichkeit kommen, stellen Sie die Verwendung ein und suchen Sie Ihren Arzt auf. Wenden Sie sich neben der Beratung mit Ihrem Arzt bitte an den Kundendienst unter customercare@vSculpt.com.
- Wenn irgendein Teil des Gerätes zerbrochen, kaputt oder beschädigt ist oder wenn im Inneren des Gerätes Anzeichen von Feuchtigkeit oder Kondenswasser zu sehen sind, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Leuchtmittel in irgendeiner Weise beschädigt sind.
- Sollte das Gerät anfangen zu überhitzen, schalten Sie es unverzüglich aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie denken, dass es in Wasser getaucht wurde.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder an einem Ort auf, an dem es in Wasser fallen oder hineingezogen werden kann.

- Halten Sie das USB-Ladekabel von Kindern fern, da es ein Strangulationsrisiko darstellt.
- Halten Sie das Ladekabel von erwärmten Oberflächen fern.
- Verwenden Sie das Gerät oder das Ladekabel nicht, wenn ein Geräteteil entweder beschädigt, fallen gelassen oder in Wasser getaucht wurde oder wenn das Kabel ausgefranst oder beschädigt ist.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an den Kundendienst von Joylux unter customercare@vSculpt.com.

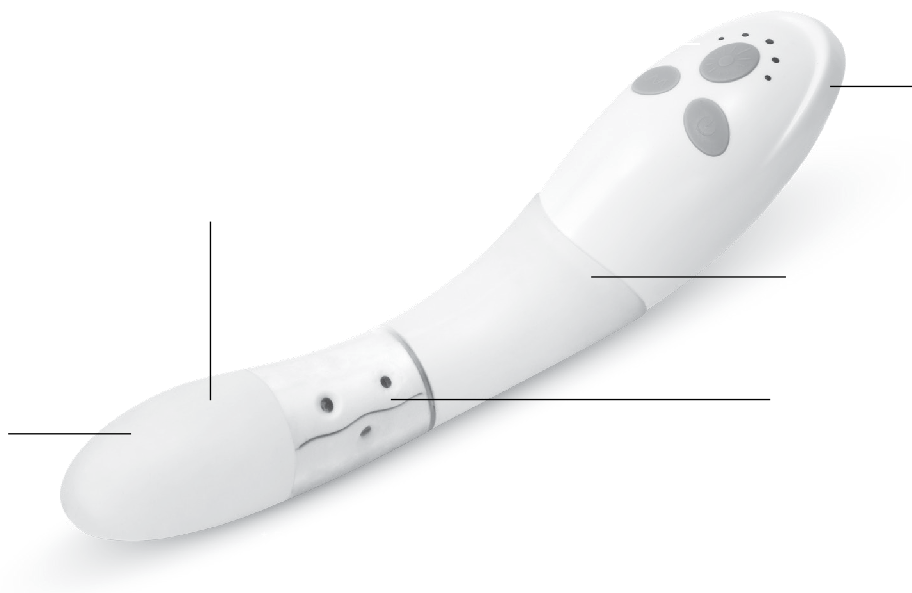

ZUBEHÖR



LERNEN SIE vSCULPT KENNEN

Was Sie erwarten können

vSculpt bietet eine nicht-invasive Methode zur Wiederherstellung des Muskels und Gewebes Ihres Beckenbodens und steigert die Lebensqualität. Um Ihnen die Verwendung von vSculpt zu erleichtern, empfehlen wir, die Behandlungsmodi im Laufe von 3 Wochen allmählich zu erhöhen. Beginnen Sie in der ersten Woche mit dem Modus für die Anfangsbehandlung (6 Minuten). In der zweiten Woche wählen Sie den Modus für die Zwischenbehandlung (8 Minuten) und am Anfang der dritten Woche gehen Sie zum fortgeschrittenen Behandlungsmodus von 10 oder 12 Minuten über.*

vSculpt bietet mit 9 Hochleistungs-LED-Leuchten (rot und infrarot) den größtmöglichen therapeutischen Nutzen zur Wiederherstellung des Gewebes und Anregung der Kollagenbildung.

*Die 12 Minuten-Behandlungsoption steht nur auf vSculpt PRO zur Verfügung


Ergebnisse

Um vollständige Ergebnisse zu erhalten, empfehlen wir, Ihr vSculpt für 45 bis 60 Tage jeden zweiten Tag zu verwenden oder solange, bis Sie die gewünschten Ergebnisse erzielen. Verwenden Sie vSculpt nach Abschluss Ihrer Erstbehandlung einmal wöchentlich, um Ihre Ergebnisse zu erhalten.

FUNKTIONEN

Zeichenerklärung

1. Ein-/Aus-Taste
2. Taste für den Lichttherapie-Modus
3. Taste für den Schall-Vibrationsmodus
4. Kontrollleuchten
5. Infrarot-Behandlungsleuchten
6. Rot-Behandlungsleuchten
7. Anschluss USB-Ladegerät

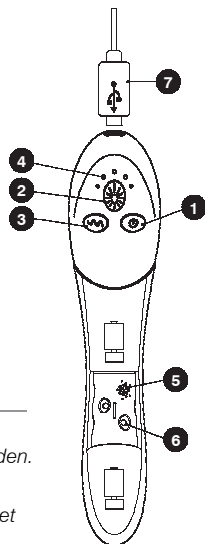

Während der Therapie kann die Vibration jederzeit eingestellt oder ausgeschaltet werden.

Während der Therapie können die Behandlungsleuchten jederzeit ausgeschaltet werden.

Schall-Vibrationsmodi & Einstellungen

vSCULPT

SCHALL-VIBRATIONSMODI

1. Durchgehend an – niedrige Intensität
2. Durchgehend an – hohe Intensität
3. Langsame Schwingung – niedrige Intensität
4. Langsame Schwingung – hohe Intensität
5. Schnelle Schwingung – niedrige Intensität
6. Schnelle Schwingung – hohe Intensität

LICHTTHERAPIE-MODI

1. Anfangsbehandlung (6 Minuten)
2. Zwischenbehandlung (8 Minuten)
3. Fortgeschrittene Behandlung (10 Minuten oder 12 Minuten)*

*Die 12 Minuten-Behandlungsoption steht nur auf vSculpt PRO zur Verfügung

vSCULPT PRO

SCHALL-VIBRATIONSMODI

1. Durchgehend an – niedrige Intensität
2. Durchgehend an – hohe Intensität
3. Langsame Schwingung – niedrige Intensität
4. Langsame Schwingung – hohe Intensität
5. Schnelle Schwingung – niedrige Intensität
6. Schnelle Schwingung – hohe Intensität
7. Impuls – niedrige Intensität
8. Impuls – hohe Intensität
9. Schneller Impuls – niedrige Intensität
10. Schneller Impuls – hohe Intensität

VORBEREITUNG ZUM GEBRAUCH

Beratung von Ihrem Arzt

Wenn Sie aufgrund von beckenbodenbedingten Veränderungen in ärztlicher Obhut sind, lassen Sie sich vor der Verwendung von vSculpt bitte von Ihrem Arzt beraten.


Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind oder denken, dass Sie schwanger sein könnten.

Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie krebsbekämpfende Medikamente, Arzneimittel oder topische Cremes verwenden, die die Lichtempfindlichkeit erhöhen.

Aufladen

Laden Sie Ihr vSculpt 12 Stunden vor der ersten Verwendung und anschließend nach jedem Gebrauch auf, damit der Akku immer voll aufgeladen ist.

- Stecken Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel in den vSculpt-Handgriff, schließen Sie es an einer universellen USB-zertifizierten Stromquelle an und stecken Sie es dann in einer Steckdose ein.
- vSculpt erkennt Strom und signalisiert dem Motor, 2 Mal zu vibrieren.
- Die mittlere rote Kontrollleuchte leuchtet und zeigt an, dass vSculpt aufgeladen wird.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die rote Kontrollleuchte grün und zeigt an, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

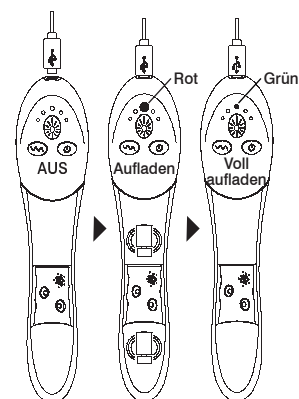


ERSTE SCHRITTE

1. Tragen Sie vor der Einführung die gewünschte Menge Photonic Gel auf die Spitze des Gerätes oder äußerlich auf.
2. Schalten Sie vSculpt ein, indem Sie auf die Einschalttaste drücken.
3. Wählen Sie Ihren Therapiemodus mit entweder 6, 8, 10 oder 12 Minuten*.
4. Drücken Sie die Taste für den Lichttherapie-Modus, um mit der Behandlung zu beginnen.
5. Legen Sie sich zurück und entspannen Sie sich – mit dem Wissen, dass Sie Ihre Beckenbodengesundheit verbessern.

*Die 12 Minuten-Behandlungsoption steht nur auf vSculpt PRO zur Verfügung

LICHTTHERAPIE-MODI

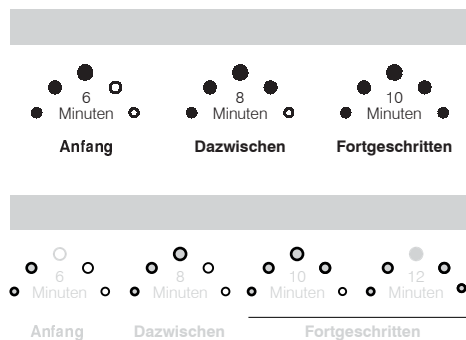


- Drücken und halten Sie nach der Auswahl eines Behandlungsmodus die Taste für den Lichttherapie-Modus, um die therapeutischen Behandlungsleuchten zu aktivieren.

Anwendung von vSculpt

1. Die therapeutischen Behandlungsleuchten leuchten rot und der Behandlungstimer wird aktiviert (das Behandlungsprogramm kann jetzt nicht mehr geändert werden).
2. Die Vibration wird standardmäßig mit gleichmäßiger Vibration, zusammen mit niedriger Intensität und Therapieleuchten durchgeführt. Der Schall-Vibrationsmodus ist unabhängig von der Lichtbehandlung; Sie können das Vibrationsmuster und die Intensität jederzeit ändern.
3. Führen Sie vSculpt 10 cm in die Vagina.
4. Der interne Timer von vSculpt wird sofort aktiviert und die Behandlung beginnt.
5. Nach Abschluss der Behandlung werden die Therapieleuchten und die Vibration automatisch ausgeschaltet.

VERWENDUNG von vSculpt (FORTSETZUNG)

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- Schall-Vibrationsmodi können nach der Lichttherapie-Behandlung unabhängig arbeiten.
- Temperatursensoren überwachen die Wärme vor, während und nach der Lichtbehandlung, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Obwohl Lichtbehandlungen über eine Standard-Vibration verfügen, passt sich die nächste Lichtbehandlung dementsprechend an, wenn Sie über 1 Minute einen neuen Schall-Vibrationsmodus verwenden, und nimmt Ihren bevorzugten Vibrationsmodus auf.
- Nach dem Beenden der Behandlungszeit schalten die Behandlungsleuchten automatisch ab und sind für 2 Stunden 30 Minuten deaktiviert, um Ihre Sicherheit und die Behandlungstreue zu gewährleisten.
- Sie können vSculpt nur weiterhin im Modus „nur Vibration“ verwenden, wenn die Behandlungsleuchten deaktiviert sind.



106

vSculpt im Modus „nur Schallvibration“ verwenden

vSculpt verfügt über 6 Schall-Vibrationsmodi:

- Durchgehend an – niedrige Intensität
- Durchgehend an – hohe Intensität
- Langsame Schwingung – niedrige Intensität
- Langsame Schwingung – hohe Intensität
- Schnelle Schwingung – niedrige Intensität
- Schnelle Schwingung – hohe Intensität

vSculpt vPRO verfügt über 10 Schall-Vibrationsmodi:

- Durchgehend an – niedrige Intensität
- Durchgehend an – hohe Intensität
- Langsame Schwingung – niedrige Intensität
- Langsame Schwingung – hohe Intensität
- Schnelle Schwingung – niedrige Intensität
- Schnelle Schwingung – hohe Intensität
- Impuls – niedrige Intensität
- Impuls – hohe Intensität
- Schneller Impuls – niedrige Intensität
- Schneller Impuls – hohe Intensität

- Scrollen Sie durch die Schall-Vibrationsmodi, bis Sie zur gewünschten Vibration gelangen. Um die Vibration auszuschalten, drücken und halten Sie einfach die Taste für den Schall-Vibrationsmodus.
- Bevorzugter Schall-Vibrationsmodus: Wenn Sie Ihren ausgewählten Schall-Vibrationsmodus über 1 Minute verwenden, wird er von vSculpt gespeichert. Wenn Sie vSculpt das nächste Mal einschalten, wird Ihr bevorzugter Schall-Vibrationsmodus eingeleitet.

BEHANDLUNGSPÄÄNE

Ihr Therapieplan sieht die Verwendung von vSculpt für 45 bis 60 Tage jeden zweiten Tag vor oder bis Sie die gewünschten Ergebnisse erzielen.

Wir empfehlen eine allmähliche Einführung der vSculpt-Therapie, indem Sie Ihre Behandlungsdauer über zwei Wochen erhöhen. Dadurch bekommen Sie Zeit, sich mit vSculpt und seinen vielen Betriebsarten und Einstellungen vertraut zu machen und anzufreunden.

WOCHE 1

Anfangsbehandlung (6 Minuten), 3 Mal wöchentlich, mit einem Tag Pause zwischen den Behandlungen.

WOCHE 2

Zwischenbehandlung (8 Minuten), 3 Mal wöchentlich, mit einem Tag Pause zwischen den Behandlungen.

WOCHE 3-8

Fortgeschrittene Behandlung (10 oder 12 Minuten), 3-4 Mal wöchentlich, mit einem Tag Pause zwischen den Behandlungen.*

Jeder Mensch ist einzigartig. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen, um sich auf die längeren Behandlungszeiten einzustellen. Ihre Anlaufzeit kann langsamer oder schneller sein – es ist beides in Ordnung.

*Die 12 Minuten-Behandlungsoption steht nur auf vSculpt PRO zur Verfügung

Instandhaltungsplan

Wenn Sie Ihren Behandlungsplan beendet haben, empfehlen wir, Ihr vSculpt 1-2 Mal wöchentlich 10-12 Minuten lang zu verwenden.* Dadurch werden Ihre Ergebnisse erhalten.

vSculpt mit Beckenbodentraining

Beckenbodentraining ist ein Weg, um Ihre Beckenbodenmuskeln zu stärken. Obwohl vSculpt nicht nur Beckenbodenmuskeln nützt, kann es in Kombination mit Beckenbodentraining Ihre Ergebnisse verstärken. Lesen Sie bitte die folgende schrittweise Anleitung.

1. Beginnen Sie nach Anleitung mit der Anwendung von vSculpt.
2. Bestimmen Sie beim Einführen von vSculpt in die Vagina die Muskeln, die Sie verwenden, um den Urin zurückzuhalten.
3. Halten Sie das vSculpt und ziehen Sie diese Muskeln für 10 Sekunden zusammen, anschließend entspannen Sie bis zu 10 Sekunden. Ihre Bauch- und Oberschenkelmuskeln sollten dabei entspannt bleiben.
4. Wiederholen Sie diese Übung während der vSculpt-Lichtbehandlung so oft Sie können. Idealerweise sollten Sie diese Beckenbodenübung 10 bis 15 Mal durchführen können.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Pflege, Reinigung & Aufbewahrung

vSculpt wird mit körpersicherem medizinischen Silikon hergestellt und ist einfach zu reinigen. Wir empfehlen Ihnen, vSculpt vor dem ersten Gebrauch und nach jedem weiteren Gebrauch mit Wasser und antibakterieller Seife vorsichtig zu reinigen, um Bakterien abzutöten und für Frische zu sorgen.

- Vergewissern Sie sich, dass vSculpt ausgeschaltet ist.
- Tauchen Sie vSculpt nicht in Wasser, lassen Sie es nicht unter Wasser laufen und legen Sie es nicht in einen Geschirrspüler, Sterilisator oder Autoklav.
- Verwenden Sie ein weiches, nichtscheuerndes Tuch und milde antibakterielle Seife, um das Gerät sauber zu wischen.

- Seifen können Reizungen verursachen, daher sollten Rückstände abgewischt werden.
- Seien Sie vorsichtig und wischen Sie um die elektrischen Steuerungen und den Ladeanschluss herum.
- Lassen Sie vSculpt nach der Reinigung an der Luft trocknen.
- Bewahren Sie vSculpt an einem kühlen, trockenen Ort auf, an dem es vor Schmutz, Staub und Fremdkörpern geschützt ist.
- Die Verwendung anderer Reinigungslösungen und -mittel kann vSculpt und seine Elektronik beschädigen.
- Mit der richtigen Pflege funktioniert vSculpt mindestens zwei Jahre.

SUPPORT

Garantie und Produktregistrierung

Einjährige Garantie gegen Probleme, die bei normalem Gebrauch des Produkts wegen Herstellermängeln auftreten. Registrieren Sie Ihr Produkt heute unter www.vSculpt.com. Registrieren Sie sich für vSculpt-E-Mails und erhalten Sie exklusiven Zugang zu vSculpt-Behandlungen, Zubehör, Beckenbodengesundheit, Wellness-Informationen und neuen Produkteinführungen.

Garantieausschlüsse

Unter der einjährigen Garantie nicht abgedeckt: Schäden durch Fehlgebrauch, Missbrauch, Verletzung der Sorgfalt, Änderungen oder unbefugte Reparatur; normale Abnutzung, einschließlich Splitter, Kratzer, Abrieb, Verfärbung oder Verblassen.

Anleitung zur Fehlerbehebung

PROBLEM: vSculpt kann nicht eingeschaltet werden. Tun Sie Folgendes:

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr vSculpt aufgeladen ist. Lesen Sie den Abschnitt „Aufladen“ in der Bedienungsanleitung.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Ein-/Aus-Taste drücken und halten.
- Wenn das Gerät immer noch nicht eingeschaltet werden kann, wenden Sie sich an den Joylux-Kundendienst unter customercare@vSculpt.com.

PROBLEM: Die Behandlungsleuchten schalten sich nicht ein. Tun Sie Folgendes:

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr vSculpt aufgeladen ist. Siehe „Aufladen“.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr vSculpt eingeschaltet ist. Siehe oben oder „Erste Schritte“.
- Vergewissern Sie sich, dass ein Behandlungsprogramm ausgewählt ist. Siehe „Erste Schritte“.
- Drücken Sie die Taste für den Lichttherapie-Modus.
- Wenn sich die Leuchten immer noch nicht einschalten, wenden Sie sich an den Joylux-Kundendienst.

SUPPORT (FORTSETZUNG)

PROBLEM: Die Vibration schaltet sich nicht ein. Tun Sie Folgendes:

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr vSculpt aufgeladen ist. Siehe „Aufladen“.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr vSculpt eingeschaltet ist. Siehe oben oder „Erste Schritte“.
- Wenn Sie das Gerät im Lichttherapie-Modus verwenden vergewissern Sie sich, dass ein Behandlungsprogramm ausgewählt ist. Siehe „Erste Schritte“.
- Wenn Sie das Gerät nur im Schall-Vibrationsmodus verwenden, drücken und halten Sie die Taste für den Schall-Vibrationsmodus.
- Wenn sich die Vibration immer noch nicht einschaltet, wenden Sie sich an den Joylux-Kundendienst.

Bleibt das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter customercare@vSculpt.com.

Nehmen Sie vSculpt nicht auseinander. Dies kann zu Beschädigung, Fehlfunktion, Stromschlag, Brand oder Verletzungen führen. Es befinden sich keine Teile im Gerät, die von der Benutzerin gewartet werden können. Wenn vSculpt nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Betätigen Sie vSculpt nie, wenn das USB-Ladekabel beschädigt ist. Wenn vSculpt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es fallen gelassen, beschädigt oder in Wasser getaucht wurde, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Kontaktinformationen

customercare@vSculpt.com
www.vSculpt.com
Seattle, WA 98122
USA

Informationen über Joylux, Inc.

Joylux, Inc. ist ein globales Unternehmen für Gesundheitstechnologie, das innovative Produkte entwickelt, um die Beckenbodengesundheit zu verwandeln und Frauen darin zu stärken, das Beste aus ihrem Leben herauszuholen. Besuchen Sie uns bitte auf www.vSculpt.com oder www.joyluxinc.com, um weitere Informationen zu erhalten.

Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Joylux, Inc. entspricht der Richtlinie 2012/19/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE).

vSculpt enthält eine Lithium-Ionen-Batterie. Zur Herstellung dieses Produkts wurden Rohstoffe extrahiert und verwendet. Es kann gefährliche Stoffe enthalten, die die Gesundheit und die Umwelt beeinträchtigen könnten, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Um die Verbreitung dieser Stoffe in unserer Umwelt zu vermeiden und den Druck auf Rohstoffe zu reduzieren, empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Rücknahmesysteme zur Produktentsorgung zu nutzen. Diese Systeme verwenden ordnungsgemäß die meisten Materialien des Produkts, das Sie entsorgen, wieder oder recyceln sie.

Das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern informiert Sie darüber, dass das Produkt nicht zusammen mit Siedlungsabfällen entsorgt werden darf und lädt Sie ein, die entsprechenden separaten Rücknahmesysteme für die Produktentsorgung zu verwenden.

Sollten Sie weitere Informationen über die Sammel-, Wiederverwendungs- und Recycling-Systeme benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche oder regionale Abfallverwaltung.

Sie können sich auch an Ihr Einzelhandelsgeschäft, den Lieferanten oder an die lokale Regierung wenden, um weitere Informationen über die Umweltverträglichkeit dieses Produkts zu erhalten.

Richtlinien über die Entsorgung dieses Gerätes finden Sie unter www.vSculpt.com.

RoHS-konform

Die Europäische Union hat Bestimmungen für die Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS) in allen Elektro- und Elektronikgeräten (EEE) festgelegt. Bitte beachten Sie die Richtlinie 2011/65/EU, die am 21. Juli 2011 in Kraft trat und am 2. Januar 2013 wirksam wurde.

CE-Kennzeichen

vSculpt ist in Europa als Medizinprodukt zugelassen und hat das CE-Kennzeichen erhalten, das auf die Einhaltung aller einschlägigen Vorschriften hinweist.

Leistungsaufnahme gemäß Federal Communications Commission (FCC)

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen elektromagnetischen Störungen verursachen, und (2) das Gerät muss Störungen aufnehmen können, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

ELEKTROMAGNETISCHE WARNUNGEN

Anleitung und Herstellerklärung – elektromagnetische Emissionen.

Das vSculpt ist für den Einsatz in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen.
Die Käuferin oder Benutzerin des vSculpt muss sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.

Emissionsprüfung	Einhaltung	Elektromagnetische Umgebung - Anleitung
HF-Emissionen (CSFPR 11)	Gruppe 1, Klasse [B]	<p>Das vSculpt nutzt HF-Energie nur für seine interne Funktion. Daher sind seine HF-Emissionen sehr niedrig und werden wahrscheinlich keine Störungen bei elektronischen Geräten in der Nähe verursachen.</p> <p>vSculpt ist für den Einsatz in allen Einrichtungen einschließlich Wohnbereichen und solchen bestimmt, die unmittelbar an ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungsnetz angeschlossen sind, das auch Gebäude versorgt, die für Wohnzwecke genutzt werden.</p>
Oberwellenemissionen (IEC 61000-3-2)	Erfüllt (1)	
Spannungsschwankungen/Flicker-Emissionen (IEC 61000-3-3)	Erfüllt (2)	
Hinweise:	<p>(1) Der Prüfling nutzt weniger als 75W. Bei Geräten mit einer Eingangsleistung von weniger als 75 W sind keine Grenzwerte festgelegt. (2) Der Prüfling erzeugt aller Wahrscheinlichkeit nach keine erheblichen Spannungsschwankungen oder Flackern. Keine Prüfung erforderlich.</p>	

Anleitung und Herstellererklärung – elektromagnetische Störfestigkeit – für alle ME-Geräte und ME-Systeme

vSculpt ist für den Einsatz in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen.

Die Käuferin oder Benutzerin des vSculpt muss sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird

Störfestigkeitsprüfung	Teststufe	Erfüllungsgrad	Elektromagnetische Umgebung – Anleitung
Elektrostatische Entladung (ESD) (IEC 61000-4-2)	± 6 kV Kontakt ± 8 kV Luft	± 6 kV Kontakt ± 8 kV Luft	Fußböden sollten aus Holz, Beton oder aus Keramikfliesen sein. Wenn die Böden mit Kunststoff bedeckt sind, sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30 % betragen.
Elektrostatische schnelle Transiente/Burst (IEC 61000-4-4)	± 2 kV Stromleitungen ± 1 kV Für Ein-/Ausgangsleitungen	± 2 kV Stromleitungen k.A.	Die Netzqualität sollte einer typischen kommerziellen oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Überspannung (IEC 61000-4-5)	± 1 kV Differenzmodus ± 2 kV Gleichtakt	k.A. ± 2 kV Gleichtakt	Die Netzqualität sollte einer typischen kommerziellen oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Schwankungen der Versorgungsspannung (IEC 61000-4-11)	<5% UT (>95% Einbruch in UT) für 0,5 Zyklen <40% UT (>60% Einbruch in UT) für 5 Zyklen <70% UT (>30% Einbruch in UT) für 25 Zyklen <5% UT (>95% Einbruch in UT) für 5 Sek.	<5% UT (>95% Einbruch in UT) für 0,5 Zyklen <40% UT (>60% Einbruch in UT) für 5 Zyklen <70% UT (>30% Einbruch in UT) für 25 Zyklen <5% UT (>95% Einbruch in UT) für 5 Sek.	Die Netzqualität sollte einer typischen kommerziellen oder Krankenhausumgebung entsprechen. Sollte die Benutzerin des vSculpt bei Stromunterbrechungen einen fortgesetzten Betrieb benötigen, empfiehlt es sich, das vSculpt mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung oder einem Akku zu versorgen. HINWEIS: UT ist die AC-Netzspannung vor Anwendung der Teststufe.
Netzfrequenz (50/60 Hz) Magnetfeld (IEC 61000-4-8)	3 A/m	30 A/m	Netzfrequenz-Magnetfelder sollten den Werten entsprechen, die an einem atypischen Ort in einer typischen kommerziellen oder Krankenhausumgebung vorzufinden sind.

Anleitung und Herstellererklärung – elektromagnetische Störfestigkeit – für ME-Geräte und ME-Systeme, die nicht der Lebenserhaltung dienen.

vSculpt ist für den Einsatz in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen.

Die Käuferin oder Benutzerin des vSculpt muss sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird


Störfestigkeitsprüfung	Teststufe	Erfüllungsgrad	Elektromagnetische Umgebung – Anleitung
			Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte sollten in keinem geringeren Abstand zu einer Komponente des vSculpt einschließlich der Leitungen verwendet werden als dem empfohlenen Schutzabstand, der nach der für die Sendefrequenz zutreffenden Gleichung berechnet wird. Empfohlener Schutzabstand
Leitungsgebundene HF (IEC 61000-4-6)	3 Vrms 150 kHz bis 80 MHz außerhalb von ISM-Bändern	6 V 150 kHz bis 80 MHz	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \text{ 80 MHz to 800 MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \text{ 800 MHz to 2.5 GHz}$

(Siehe Hinweise auf der folgenden Seite)

Hinweise: HINWEIS 1 Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.
HINWEIS 2 Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen wird durch Absorption und Reflexion von Strukturen, Gegenständen und Menschen beeinflusst.

^(a) Feldstärken von stationären HF-Sendern wie Funk-(Mobil-/Schnurlos)-Telefonen und mobilen Landfunkgeräten, Amateurfunk, AM- und FM-Rundfunkübertragung und TV-Sendung können theoretisch nicht mit Genauigkeit vorhergesagt werden. Um die elektromagnetische Umgebung hinsichtlich stationärer HF-Sender zu ermitteln, sollte eine elektromagnetische Untersuchung vor Ort erwogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke an der Stelle, an der vSculpt verwendet wird, den zulässigen HF-Erfüllungsgrad überschreitet, muss vSculpt hinsichtlich seines normalen Betriebs beobachtet werden. Wenn ein nicht ordnungsgemäßer Betrieb beobachtet wird, werden unter Umständen zusätzliche Maßnahmen erforderlich, wie beispielsweise die Neuausrichtung oder Verlagerung des vSculpt.

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
^(b) Über dem Frequenzbereich 150 kHz bis 80 MHz sollten Feldstärken unter 10 V/m liegen.



BEGRIFFSERLÄUTERUNG DER SYMBOLE



Beiliegende Bedienungsanleitung

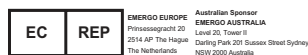

Bevollmächtigter

CE-Kennzeichnung mit Nummer der benannten Stelle

REF Geräte-Modellnummer, Katalognummer

Allgemeines Warnsymbol



Health Canada Santé Canada

Lizenziertes Medizinprodukt von Health Canada



Grenzwerte der Luftfeuchtigkeit



Vor Nässe schützen



Taste für den Lichttherapie-Modus



Hergestellt von Joylux Inc. Seattle, WA



Ein-/Aus-Taste (Drucktaste)



Beschränkung gefährlicher Stoffe



Seriennummer



Taste für den Schall-Vibrationsmodus



Temperaturgrenzen



Anwendungsteile vom Typ B



Erfüllung der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

In den USA entwickelt und entworfen, in China hergestellt
vSculpt® ist eine eingetragene Handelsmarke von Joylux, Inc.
Urheberrecht für alle Entwürfe, Bilder und Text ©Joylux, Inc. 2017 Alle Rechte vorbehalten.

Ausstehende CAN-Patente: 30411-27796/CA • 30411-29410/CA US und internationale Patente ausgestellt und ausstehend.
Besuchen Sie vsulpt.com/patents, um eine vollständige Liste zu erhalten.

